

検査の流れ

1 検査はだ液を少量ですだけ

採取は2～5分程度で終わります。

0.1cc



2 衛生検査所にてだ液成分を測定

だ液中のがん特有の代謝物の濃度を解析します。



3 検査結果を受け取る

検査実施日より約3週間で医療機関へ結果を提供します。検査を受診された方へお渡しするまでの期間は各施設ごとに異なります。



だ液採取前の注意事項

だ液は午前中に採取してください。

※下記注意事項を遵守できなかった場合、検査結果に影響を及ぼす可能性がございます。

検査方法をWEBでチェック! ⇒



検査
2日前～



を原材料とした



の摂取をしない。

サプリメント
健康食品

■以下の食品の過剰摂取は控え、
1日あたりの摂取量を守る。



納豆
1パックまで



豆腐
1/2丁まで



豆類
50gまで



ナッツ類
50gまで



シジミ
約20個まで
(可食部)



醤油・味噌などの調味料

通常通り摂取OK

※コーヒー、小豆は摂取可能。シジミ以外の貝類は摂取可能。

検査
前日

夜9時以降^{※1}、ガム、飴、トローチ、水以外の飲食をしない。
薬を服用しない^{※2}。

※1 採取の12時間前を目安とします。

※2 薬を服用中の方は、事前に医師等にご相談ください。

検査
当日

朝食をとらない。薬を服用しない。

×入れ歯安定剤 ×ガム、飴、トローチ

※服用した場合、医師等にお伝えください。

検査
1時間前

歯みがきは採取1時間前までに済ませる。

×激しい運動 ×喫煙

×出血をともなうような口腔内の手入れ
(歯ブラシ、歯間ブラシ、爪楊枝など)

×うがい薬

検査
直前

採取15分程前にコップ半分(100mL)程度の水を飲む

※他の検査で水分を摂取できない場合は軽く口をゆすぐ。

※口紅、リップクリームは検査前にふきとる。

その他の注意事項

体調が悪い(風邪、発熱、炎症等)場合は回復されてからの受検をお勧めします。

だ液による
がんリスク検査

SalivaChecker®

サリバチェッカー®

早期発見

ステージ0、1のがんでも発見できる可能性があります。




手軽

だ液を数滴だけです。手軽に検査を受けられます。



痛くない

痛みが苦手な方でも安心して受けられます。

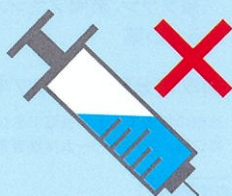


どうしてだ液でがんのリスクがわかるの？

がん細胞からしみ出す代謝物がだ液に表れるからです。

だ液中の成分の大部分は血液由来です。がん細胞からしみ出す代謝物は血管を通り、だ液中に表れます。

サリバチェッカーはこれらの代謝物を測定し、AI(人工知能)を利用して、被検者の方の代謝物のパターンががんの方とそうでない方のどちらに似ているかをがんの種類ごとに評価します。

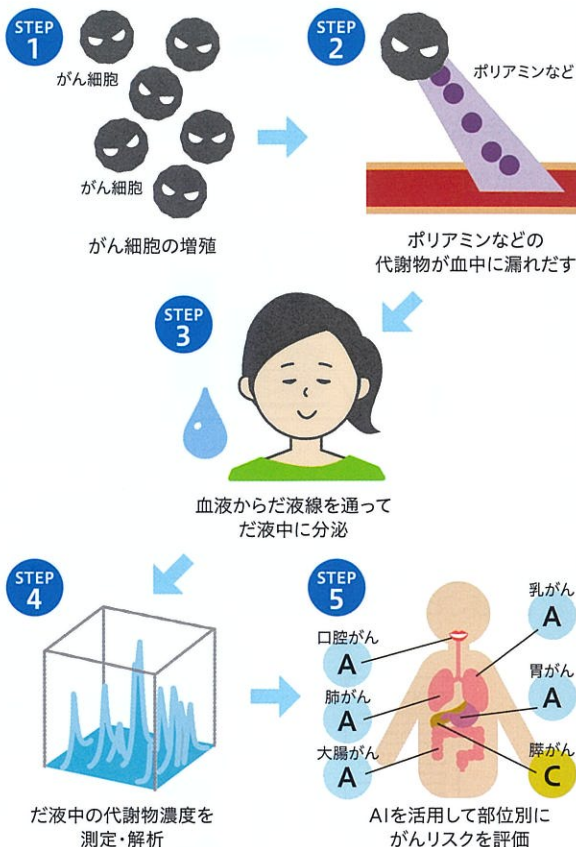

なぜだ液を使うの？

代謝物の研究成果とだ液ならではの利便性

代謝物研究で、血液、尿、だ液などを調べたところ、がんの方とそうでない方を見分ける上で、だ液のデータが最も優れていました。

だ液はどこでも採取可能で、採取しても身体に負担がないため、がんの早期発見に適しています。

代謝物質の研究結果上で



侵襲性 低

痛くない、
身体に負担がない



利便性 高

面倒でない
どこでも採取可能

最先端のバイオテクノロジー 研究拠点で開発

サリバチェッカーを開発した株式会社サリバテックは、慶應義塾大学先端生命科学研究所の研究成果をもとに、医療分野での応用と技術開発を進めています。研究施設が隣接する鶴岡市先端研究産業支援センターを拠点に事業を展開しています。



写真提供：
アジレント・テクノロジー

今を知って、未来を生きる 早めに備えるがん対策

だ液による、がんリスク検査 SalivaChecker®

はじめよう、サリバチェッカー®

check!

- check 1 ☐ 家族にがんの人がいる
- check 2 ☐ 検査を受けるのが面倒
- check 3 ☐ 痛い検査は苦手だ
- check 4 ☐ 身体のあちこちの不調が気になる
- check 5 ☐ たばこを吸う、副流煙が気になる
- check 6 ☐ 便に血が混じる
- check 7 ☐ 糖尿病だ、最近糖尿病が悪化した
- check 8 ☐ 1年以上健康診断を受けていない

1つでも
当てはまる人は

サリバチェッカー®で
現在のがんのリスクを
調べましょう。



2
人
に
1
人
が

SalivaChecker® (サリバチェッカー®) の特長は？

SalivaChecker®を受けましょう

1 検査申し込み

サリバテック

Q 検索

当院での受診をご希望の場合はスタッフにお申し付けください。インターネットでも検査を受けられる医療機関を検索できます。




医療機関リストのページへ

https://salivatech.co.jp/screening_search/medical-list/



2 検査はだ液を少量ですだけ

採取は2～5分程度で終わります。

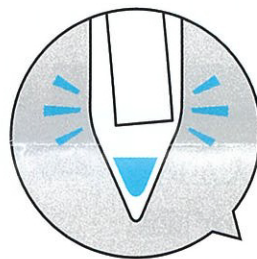


0.1cc



3 衛生検査所にてだ液成分を測定

だ液中のがん特有の代謝物の濃度を解析します。

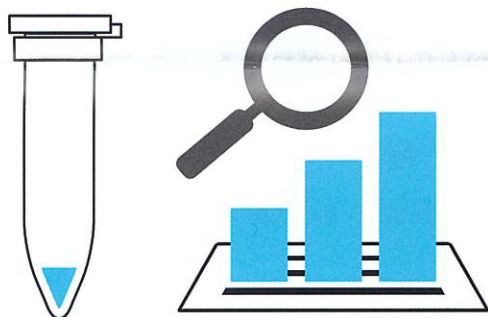


4 検査結果を受け取る

検査実施日より約3週間で医療機関へ結果を提供します。検査を受診された方へお渡しするまでの期間は各施設ごとに異なります。




5 定期的な検査を

定期的にSalivaChecker®を受けていただくことをお勧めします。

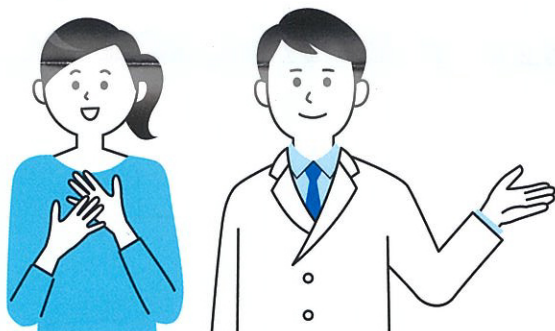

検査結果レポート

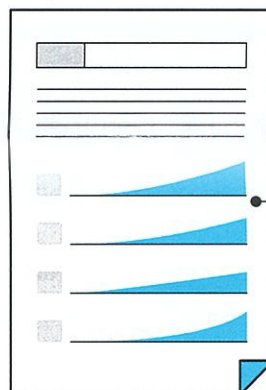

ご自身の検査結果を
グラフで表します。



SalivaTech

〈検査キット開発元／検査・測定機関〉

株式会社サリバテック 住所／山形県鶴岡市覚岸寺字水上246番地2

URL <https://salivatech.co.jp/>

サリバテック

Q 検索

